

Lotus actieve opstahulp

Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 200 kg (Lotus /Lotus Compact) of 227 kg (Lotus XL)
- Zorg ervoor dat de Lotus/Lotus Compact/Lotus XL op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.





02. Gebruik

1. Verrijd de Lotus/Lotus Compact/Lotus XL naar de cliënt en draai de zitdelen weg.
2. Spreid indien nodig de poten van de Lotus/Lotus Compact/ Lotus XL en verrijd hem zo dicht mogelijk naar de cliënt toe.
3. Zet de Lotus/Lotus Compact/Lotus XL op de rem.
4. Laat de cliënt opstaan en draai de zitting terug.
5. De cliënt kan nu gaan zitten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

03. Wielblokkering

1. Wielblokkering
2. Ontgrendelen

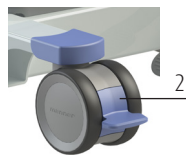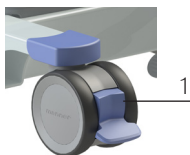

5900 8200
Lotus



5900 8250
Lotus Compact




5900 8270
Lotus XL



04. Pootspreiding


De Lotus/Lotus Compact/Lotus XL is uitgerust met een mechanische pootspreiding.

Door op 1 kant van het pedaal te trappen, zullen de poten naar binnen of naar buiten bewegen (afhankelijk van welk pedaal u kiest).

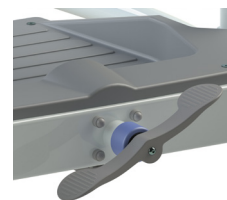


05. Wegdraaibare zitdelen

De Lotus/Lotus Compact is uitgerust met 2 comfortabele zitdelen die weggedraaid kunnen worden. De Lotus/Lotus Compact heeft een instap van 44 cm, wanneer de zitdelen weggedraaid zijn.

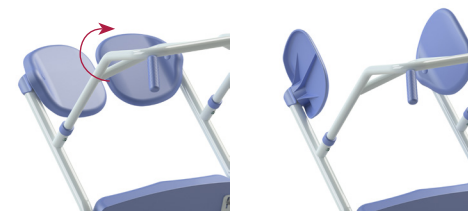

De Lotus XL heeft een instap van 52 cm.

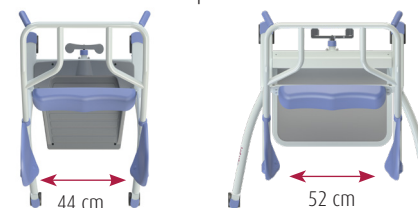

06. Verstelbare onderbeensteun

Door de moeren waarmee de onderbeensteun bevestigd is iets los te draaien, kan de onderbeensteun omhoog of omlaag versteld worden.



11. Reiniging en onderhoud

De Lotus/Lotus Compact/Lotus XL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Lotus/Lotus Compact/Lotus XL volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl

