

Sirocco Basic & Sirocco Deluxe douchebrancard

Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 227 kg (Deluxe) en 150 kg (Basic)



02. Bedieningspaneel

- Omhoog Omlaag Rug omhoog Rug omlaag
- Deluxe Deluxe



03. Waterafvoer

Via de afvoerslang wordt het water naar een afvoer geleid. Haal hiervoor de slang uit de uitsparing (1) en leid deze naar een zo laag mogelijk geleiden afvoerpunt.



04. Opklappen ligvak

Het ligvak is eenvoudig omhoog te klappen, om ruimte te besparen.




6500 2510
Sirocco Deluxe



6500 2500
Sirocco Basic




6500 2505
Sirocco Basic
vaste hoogte

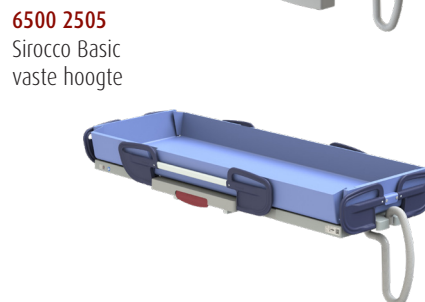

05. Zijhek

1. Ontgrendelen (trek aan de hendel (1))
2. Beweeg het zijhek naar de gewenste stand: gesloten / breed / open (2).

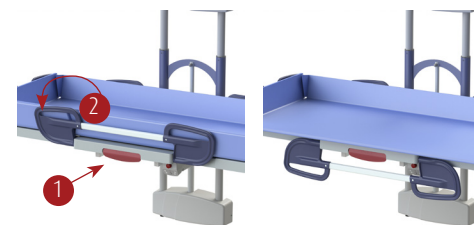

05. Opladen accu

Laad de accu op voordat deze helemaal leeg is, voor behoud van de accu.

Accu indicatie te vinden op handbediening.



volledig geladen



1/3 capaciteit, opladen geadviseerd



2/3 capaciteit



opladen vereist, er klinkt een akoestisch signaal

06. Reiniging en onderhoud

De Sirocco Basic / Sirocco Deluxe dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Sirocco volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.

Tel: +31 (0) 13-5239300

E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl

