

Tango XXL douche-toiletstoel

Instructiekaart

5100 5850
Tango XXL

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 360 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.



02. Gebruik

1. Breng de stoel in de juiste positie en draai de voetensteunen weg.
2. Zet de stoel op de rem!
3. Klap indien nodig de armsteunen omhoog.
4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
5. Sluit de armsteunen en laat de voeten van de cliënt op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

03. Afneembare zitting

Indien gewenst is de zitting van de Tango XXL los van het frame te halen. Hierdoor is de zitting extra goed te reinigen. Er kan geen vuil tussen het frame en de zitting blijven zitten.




06. Voetensteun

Beide voetensteunen dienen weg gedraaid te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Zorg ervoor dat de cliënt met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden. De voetensteun is verstelbaar in drie breedteposities. Til de voetensteun op en draai deze naar buiten. De voetensteun vergrendelt automatisch met een pen in een van de drie posities.




04. Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

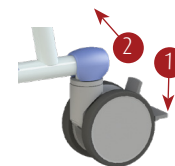

05. Richtings- / geremd wiel

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

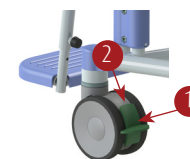

07. Armsteun

1. Ontgrendelen
2. Druk op de blauwe knop
3. Naar achter draaien



Sluiten in omgekeerde volgorde.

De armsteunen van de Tango XXL zijn in breedte verstelbaar. Draai de vleugelbout van de armsteun los, en schuif de armsteun naar de gewenste stand. Als de juiste stand is bereikt, draai dan de vleugelbout weer stevig vast.

08. Toiletfunctie

- *In combinatie met toilet:* De Tango XXL kan over bijna ieder toilet gereden worden.
- *Met ondersteek:* De Tango XXL kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

09. Reiniging en onderhoud

De Tango XXL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Tango XXL volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl



 **ISO CERTIFIED**
9001 - 13485 - 14001

INSCC5850-2026-01 NL