



## Gebruikershandleiding

Douche/toilet-rolstoel 'Tango'

**Belangrijk:**

Lees deze instructies eerst goed door voordat u de Elexo in gebruik neemt!

Datum .....

Gebruiker .....

Naam .....

Adres .....

**Fabrikant**

Lopital Nederland B.V.  
Laarakkerweg 9  
5061 JR Nederland  
T (0031) 13 52 39 300  
F (0031) 13 52 39 301  
www.lopital.com  
info@lopital.nl

# Index

Inleiding

Veiligheid

Remmen

Gaan zitten / gaan staan

Opklapbare voetsteunen

Opklappen van armleuningen


Vergrendelbare voorsluiting

Gebruik ondersteek / emmer

Gebruik toiletfunctie

Onderhoud

Technische gegevens

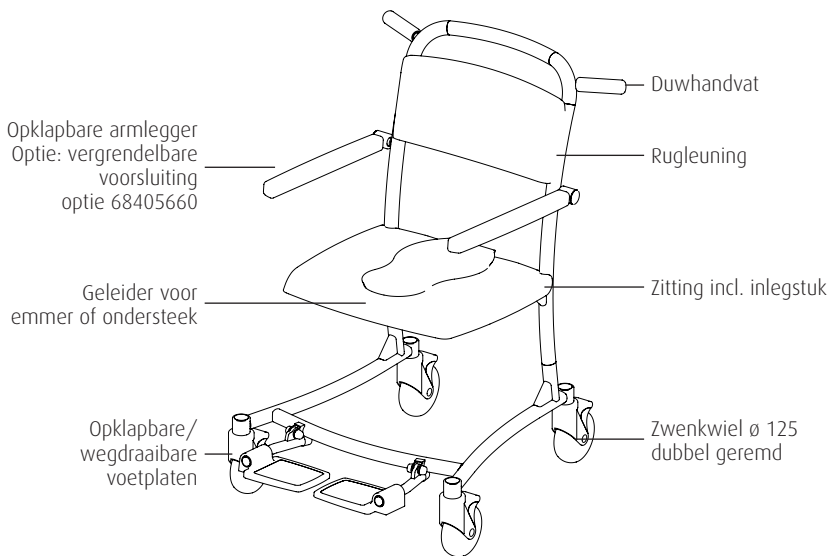

# Inleiding

De douche/toilet-rolstoel 'Tango' is een hulpmiddel bedoeld voor het verzorgen en wassen van patiënten en bewoners. De verrijdbaarheid maakt de stoel tot een gebruiksvriendelijk product.

De Tango is een douche- en toiletrolstoel met onafhankelijk opklapbare RVS armleggers, polyurethaan zitting, rail voor ondersteek of toiletemmer, wegdraaibare en opklapbare voetsteunen.

Wij, Lopital Nederland B.V., zijn trots dat u voor een kwaliteitshulpmiddel heeft gekozen. Jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van bad-, toilet- en douchehulpmiddelen heeft Lopital Nederland B.V. tot toonaangevend bedrijf op dit gebied gemaakt. De douchestoelen voldoen aan de CE-veiligheidsnormen. Deze normen zijn conform de richtlijn medische hulpmiddelen van 14 juni 1993 no. 93/42 EEG.

Op douche- en toilethulpmiddelen geeft Lopital Nederland B.V. een fabrieksgarantie van 2 jaar. Normale slijtage en onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie. Lopital Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door oneigenlijk gebruik van de douche- en toiletrolstoelen.

# Veiligheid


De Tango is een veilig en makkelijk te gebruiken product voor in hoofdzakelijk vochtige ruimten. Enkele veiligheidstips:

- Laat de patiënt nooit alleen achter in de stoel (noodgevallen uitgezonderd).
- Zet de stoel bij gebruik op zijn rem.
- Rijd met de gebruiker in de stoel nooit te dicht langs muren en kozijnen, daar de patiënt gemakkelijk de handen tussen de stoel en muur of kozijn kan krijgen.

Bij vragen en in geval van mankementen dient u contact op te nemen met Lopital Nederland B.V. E-mail: [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl).

## Remmen

- De Tango kan op de rem worden gezet door het uitstekende lipje (1) op het wiel, naar beneden te trappen.
- Om de Tango van de rem te halen moet het opstaande lipje (2) van het wiel naar beneden worden gedrukt.

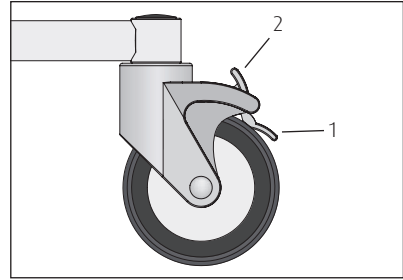

## Gaan zitten / gaan staan

- De verzorger klapt de voetsteunen op, indien nodig.
- De gebruiker staat rechtop en houdt zich vast aan een vaste ondersteuning, bijvoorbeeld een bed of handgreep.
- De verzorger rijdt de Tango aan de achterzijde naar de gebruiker toe.
- Voor het uitvoeren van de transfer moet de Tango op de rem staan.
- De gebruiker kan nu gaan zitten.

Gaan staan gebeurt in omgekeerde volgorde.

## Opklapbare voetsteunen

- Voordat de Tango verplaatst wordt, dient de verzorger eerst de voetsteunen naar beneden te klappen.
- De gebruiker tilt hiertoe eerst het ene been omhoog, de verzorger klapt dan de voetsteun omlaag en plaats de voet op de steun. Daarna hetzelfde voor de andere voet.

## Opklappen van armleuningen

De onafhankelijk opklapbare armleuningen zijn eenvoudig op te klappen, bescherm de gebruiker bij het omhoog en omlaag bewegen van de armleggers.


In opgeklapte toestand behoren deze niet uit zichzelf terug te vallen, in andere gevallen raadpleeg uw leverancier.



**Attentie: Bij het neerklappen van de armleuningen en voetplaten het scharnierpunt ontwijken i.v.m. klemming van de vingers.**

## Vergrendelbare voorsluiting (optie 68405660)

- Als de gebruiker op de Tango plaats heeft genomen, worden de armleggers met voorsluiting naar beneden geklapt en worden daarna voor de gebruiker gedraaid.
- De armleggers met voorsluiting zijn in horizontale positie geborgd.
- De armleggers kunnen ontgrendeld worden door de beveiligingspal bij het scharnierpunt aan het frame in te drukken (zie afbeelding), hierna kan de armlegger voor de gebruiker weggedraaid worden en omhoog geklapt worden.
- Bescherm de gebruiker altijd bij het omhoog of omlaag klappen van de armleggers.
- De armleggers kunnen ook als steun gebruikt worden bij het gaan zitten en staan, houdt er wel rekening mee dat de armleggers dan niet in alle draairichtingen vergrendeld zijn.

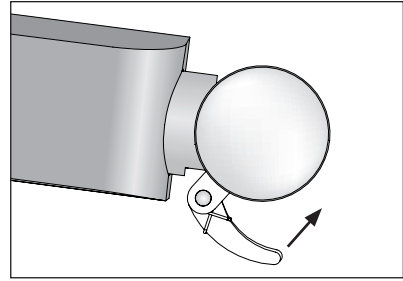

**Attentie: Bij het neerklappen van de armleuningen het scharnierpunt ontwijken i.v.m. klemming van de vingers.**

## Gebruik ondersteek/emmer

- Als de Tango gebruikt wordt als toiletstoel dan kan onder de zitting in de speciale geleider een ondersteek of toiletemmer geschoven worden.
- De ondersteek of toiletemmer wordt aan de achterzijde van de stoel ingeschoven.

**Om verwondingen aan de gebruiker te voorkomen adviseren wij de verzorger de deksel uit de zitting te verwijderen en de ondersteek of toiletemmer te plaatsen voordat de gebruiker plaatsneemt.**

## Gebruik toiletfunctie

- De Tango kan ook over het toilet gereden worden.
- Nadat de gebruiker heeft plaatsgenomen rijdt de verzorger de Tango achterwaarts over het toilet.

**Om verwondingen aan de gebruiker te voorkomen adviseren wij de verzorger de deksel uit de zitting te verwijderen voordat de gebruiker plaatsneemt.**

**Opmerking: de Tango past niet over ieder toilet**

## Onderhoud

- De Tango dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen, gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. (Zoals chloor)
- Als de Tango gedesinfecteerd moet worden adviseren wij u Neoquat combi®, gebruik hiervoor geen oplossing met alcohol.
- Controleer regelmatig de wielen op haren en stof en verwijder deze zonedig.
- Verwijder overtollige zeepresten.
- Onderhoud en reparatie alleen door geautoriseerd personeel uit te voeren.

## Technische gegevens

Stalen buizen voorzien van een 2-laags poedercoating.

Opklapbare armleggers van polyurethaan.

Maximaal toelaatbare belasting 135 kg.

Eigen gewicht basisuitvoering 51005700 19 kg.

