




Gebruikershandleiding

Douche/toiletstoel

type 54002040

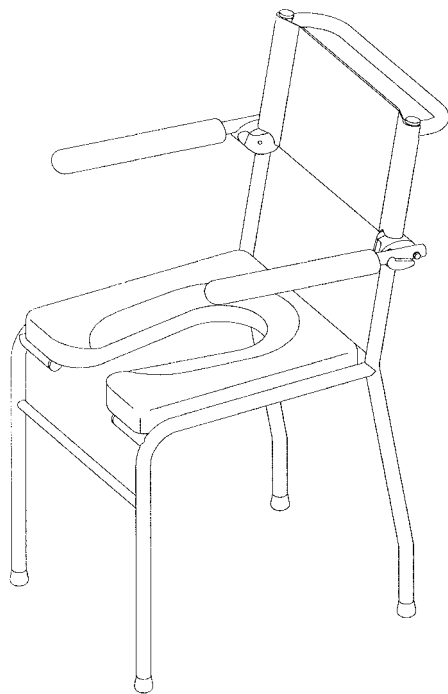

Belangrijk:

Lees deze instructies eerst goed door voordat u de stoel in gebruik neemt!

Datum ingebruikneming

.....

Gebruiker

.....

Naam

.....

Adres

.....

Manufactured by:

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9

5061 JR Nederland

T (0031) 13 52 39 300

F (0031) 13 52 39 301

www.lopital.nl

info@lopital.nl

Algemeen

Douchestoel

De douchestoel is een hulpmiddel bedoeld voor het wassen en verzorgen van patiënten in vochtige ruimtes. De douchestoelen bestaan uit de volgende varianten:

- Douchetabouret (zonder rugleuning); type 54002005
- Douchestoel met opklapbare armleuningen; type 54002020
- Douche-(toilet) stoel met met onafhankelijk opklapbare RVS armleggers, polyurethaanzitting, rail voor ondersteek of toiletemmer; type 54002040
- Heavy duty douche-(toilet) stoel met met vaste armleggers, neopreen zitting, rugleuning van Bisonyl, rail voor ondersteek of toiletemmer; type 54002042

Inleiding

Wij als Lopital Nederland B.V. zijn er trots op dat u voor een kwaliteits-hulpmiddel heeft gekozen. Jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van bad-, toilet- en douchehulpmiddelen heeft Lopital Nederland B.V. tot toonaangevend bedrijf op dit gebied gemaakt. De douchestoelen voldoen aan de CE-veiligheidsnormen. Deze normen zijn conform de richtlijn medische hulpmiddelen van 14 juni 1993 no. 93/42 EEG.

Garantie

Op toilethulpmiddelen geeft Lopital Nederland B.V. een fabrieksgarantie van 2 jaar. Normale slijtage en onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie. Lopital Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door oneigenlijk gebruik van de douchestoelen.

Veiligheid

De douchestoel is een veilig en makkelijk te gebruiken product voor in hoofdzakelijk vochtige ruimtes.



Attentie: Bij het neerklappen van de armleggers het scharnierpunt ontwijken i.v.m. klemming van de vingers.

Bij vragen en in geval van mankementen dient u contact op te nemen met Lopital Nederland B.V. E-mail: service@lopital.nl.

Onderhoud

De douchestoelen kunnen na gebruik gereinigd worden met water en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen; gebruik hiervoor geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Opklappen van armleuningen

De onafhankelijk opklapbare armleuningen zijn eenvoudig op te klappen. In opgeklapte toestand behoren deze niet uit zichzelf terug te vallen, in andere gevallen raadpleeg uw leverancier.

Technische gegevens

Stalen buizen voorzien van een stoot- en slagvaste 2-laags poedercoating.

Opklapbare armleggers van polyurethaan.

Maximaal toelaatbare belasting:		135 kg
Eigen gewicht basisuitvoering	54002005:	4,4 kg
	54002020:	7,4 kg
	54002040:	14,2 kg
	54002042:	20,0 kg (maximale belasting 300 kg)



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

