


Gebruikershandleiding

Douche/toilet-rolstoel

type 54002035

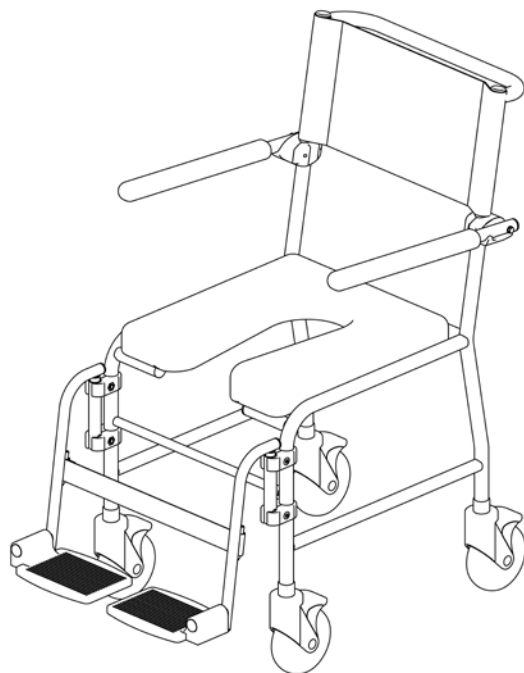

Belangrijk:

Lees deze instructies eerst goed door voordat u de rolstoel in gebruik neemt!

Datum ingebruikneming

.....

Gebruiker

.....

Naam

.....

Adres

.....

Manufactured by:

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.nl
info@lopital.nl

Algemeen

Doucherolstoel

De doucherolstoel is een hulpmiddel bedoeld voor het verzorgen en wassen van patiënten en bewoners. De verrijdbaarheid maakt de stoel tot een gebruiksvriendelijk product. De doucherolstoelen bestaan uit de volgende modellen:

- Doucherolstoel met onafhankelijk opklapbare RVS armleggers; type 54002025 (kindermodel; type 54002045)
- Douche-(toilet)rolstoel met onafhankelijk opklapbare RVS armleggers, polyurethaanzitting, rail voor ondersteek of toiletemmer; type 54002030 (kindermodel 54002050)
- Douche-(toilet)rolstoel met onafhankelijk opklapbare RVS armleggers, polyurethaanzitting, rail voor ondersteek of toiletemmer, wegzwenkbare/afneembare/in hoogte verstelbare beensteunen; type 54002035
- Heavy duty douche-(toilet)rolstoel met vaste armleggers, afneembare voetensteun, neopreen zitting, rugleuning van Bisonyl, rail voor ondersteek of toiletemmer; type 54002037
- Douche-(toilet)rolstoel zelfbeweger met twee 24" wielen, onafhankelijk opklapbare RVS armleggers, polyurethaan zitting, rail voor ondersteek of toiletemmer, wegzwenkbare/afneembare/in hoogte verstelbare beensteunen; type 54003005 (kindermodel 54003030)
- Doucherolstoel zelfbeweger met twee 24" wielen, onafhankelijk opklapbare RVS armleggers en wegzwenkbare/afneembare/in hoogte verstelbare beensteunen; type 54003010 (kindermodel; type 54003025)

Inleiding

Wij als Lopital Nederland B.V. zijn er trots op dat u voor een kwaliteits-hulpmiddel heeft gekozen. Jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van bad-, toilet- en douchehulpmiddelen heeft Lopital Nederland B.V. tot toonaangevend bedrijf op dit gebied gemaakt. De douchestoelen voldoen aan de CE-veiligheidsnormen. Deze normen zijn conform de richtlijn medische hulpmiddelen van 14 juni 1993 no. 93/42 EEG.

Garantie

Op douche- en toilethulpmiddelen geeft Lopital Nederland B.V. een fabrieksgarantie van 2 jaar. Normale slijtage en onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie. Lopital Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door oneigenlijk gebruik van de doucherolstoelen.

Veiligheid

De doucheroelstoel is een veilig en makkelijk te gebruiken product voor in hoofdzakelijk vochtige ruimtes. Enkele veiligheidstips:

- Laat de patiënt nooit alleen achter in de stoel (uitgezonderd bij een noodgeval).
- Zet de stoel bij gebruik op zijn rem.
- Rij nooit met de patiënt in de stoel te dicht langs muren en kozijnen, daar de patiënt gemakkelijk de handen tussen de stoel en muur of kozijn kan krijgen.

Bij vragen en in geval van mankementen dient u contact op te nemen met Lopital Nederland B.V. E-mail: service@lopital.nl

Onderhoud

De doucheroelstoelen kunnen na gebruik gereinigd worden met water en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen; gebruik hiervoor geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Opklappen van armleuningen

De onafhankelijk opklapbare armleuningen zijn eenvoudig op te klappen. In opgeklapte toestand behoren deze niet uit zichzelf terug te vallen, in andere gevallen raadpleeg uw leverancier.



Attentie: Bij het neerklappen van de armleuningen het scharnierpunt ontwijken i.v.m. klemming van de vingers.

Technische gegevens

Stalen buizen voorzien van een stoot- en slagvaste 2-laags poedercoating.

Opklapbare armleggers van polyurethaan.

Maximaal toelaatbare belasting:		135 kg
Eigen gewicht basisuitvoering:	54002025	12,0 kg
	54002030	13,6 kg
	54002035	16,6 kg
	54003005	22,6 kg
	54003010	19,0 kg
	54002045	11,0 kg
	54003025	18,5 kg
	54002037	25,0 kg (maximale belasting 300 kg)



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

