



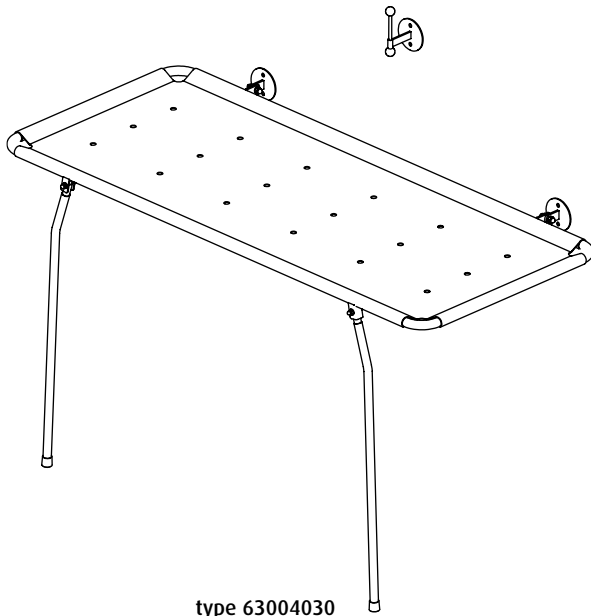

Gebruikershandleiding

Douchebrancard & aankleedtafel hydraulisch h/l verrijdbaar, muurbevestiging of verrijdbaar

type 62004010

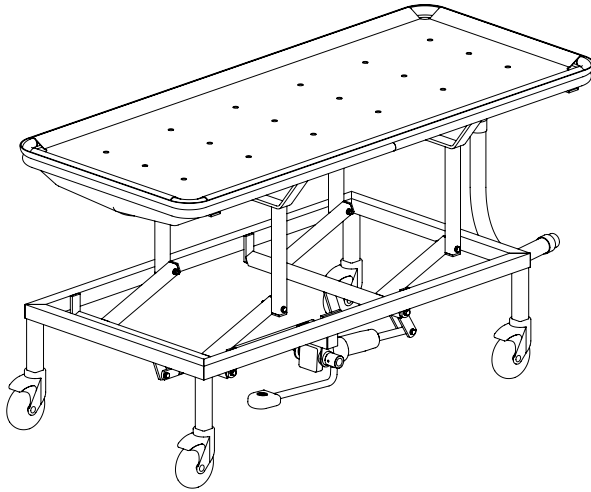

type 63004030

Belangrijk:

Lees deze instructies eerst goed door voordat u de douchebrancard in gebruik neemt!

Datum ingebruikneming

.....

Gebruiker

.....

Naam

.....

Adres

.....

Manufactured by:

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.nl
info@lopital.nl

Algemeen

Douchebrancard

De douchebrancard/aankleedtafel is een hulpmiddel bedoeld voor het verzorgen en/of wassen van patiënten en bewoners onder stromend water. De douchebrancard/aankleedtafel is een gebruiksvriendelijk product.

De douchebrancard/aankleedtafel bestaat uit de volgende modellen:

- Douchebrancard hydraulisch hoog/laag verrijdbaar met kunststof opvangbak; type 62004010/15. Electrisch hoog/laag, type 62004011/16.
- Aankleedtafel hydraulisch hoog/laag; type 65004020/25. Electrisch hoog/laag, type 65004021/26.
- Douchebrancard scharnierend aan de muur met wegklapbare poten; type 63004030/35.
- Douchebrancard scharnierend aan de muur met wegklapbare poten en kunststof wateropvangbak; type 63004040/45.
- Aankleedtafel scharnierend aan de muur met wegklapbare poten; type 65004070/75.
- Alle modellen zijn ook met neerklapbaar zijhek leverbaar; optie: 67904120/25.
- Alle modellen zijn met rugverstelling leverbaar, voor de aankleedtafels is dit aanpassing 67754110/15 en voor de douchebrancards is dat aanpassing 62004010/05.
- Standaard maten zijn: 70 x 160 en 70 x 190 cm.

Inleiding

Wij als Lopital Nederland B.V. zijn er trots op dat u voor een kwaliteits-hulpmiddel heeft gekozen. Jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van bad-, toilet- en douchehulpmiddelen heeft Lopital Nederland B.V. tot toonaangevend bedrijf op dit gebied gemaakt. De douchebrancard/aankleedtafel voldoet aan de CE-veiligheidsnormen. Deze normen zijn conform de richtlijn medische hulpmiddelen van 14 juni 1993 no. 93/42 EEG.

Garantie

Op douche- en toilethulpmiddelen geeft Lopital Nederland B.V. een fabrieksgarantie van 2 jaar. Normale slijtage en onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie. Lopital Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door oneigenlijk gebruik van de douchebrancard/aankleedtafel.

Veiligheid

Enkele veiligheidstips:

- Laat de patiënt nooit alleen achter op de brancard (uitgezonderd bij een noodgeval).
- Zet de brancard bij gebruik op zijn rem (62004010/15, 62004011/16, 65004020/25, 65004021/26).
- Rij nooit met de patiënt op de brancard te dicht langs muren en kozijnen, daar de patiënt gemakkelijk de handen tussen de brancard en de muur of kozijn kan krijgen (62004010/15, 62004011/16, 65004020/25, 65004021/26).

Bij vragen en in geval van mankementen dient u contact op te nemen met Lopital Nederland B.V. E-mail: service@lopital.nl.

Onderhoud

De douchebrancard en het neerklapbaar zijhek kunnen na gebruik gereinigd worden met water en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen; gebruik hiervoor geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Technische gegevens

Stalen buizen voorzien van een stoot- en slagvaste 2-laags poedercoating.

Alle scharnierpunten van RVS.

Maximaal toelaatbare belasting:		135 kg
Eigen gewicht:	62004010/15:	52,8 kg
	62004011/16:	60,0 kg
	65004020/25:	52,8 kg
	65004021/26:	60,0 kg
	63004030/35:	18,0 kg
	63004040/45:	20,4 kg
	65004070/75:	23,0 kg



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

