



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be





Gebruikershandleiding Douchebrancard & aankleedtafel

Belangrijk:

Lees deze instructies eerst goed door voordat u de tafel in gebruik neemt!

Datum ingebruikneming

.....

Gebruiker

.....

Naam

.....

Adres

.....

Manufactured by:

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9

5061 JR Nederland

T (0031) 13 52 39 300


F (0031) 13 52 39 301

www.lopital.nl

info@lopital.nl

Index

Inleiding	4
Garantie	4
Veiligheid	4
Kenmerken	5
Noodstop	5
Opklappen van de douchebrancard/aankleedtafel	5
Bediening zijhek	6
Waterafvoer	6
Accu verwisselen	7
Accu opladen	7
Onderhoud	8
Technische gegevens	8
Installeren	9

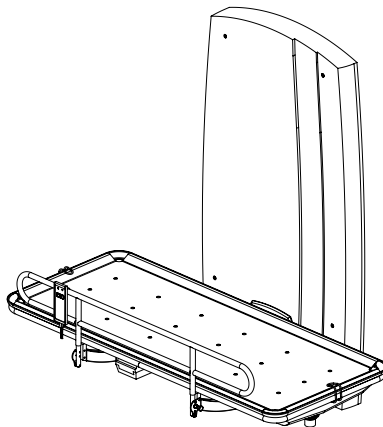

Inleiding

De douchebrancard/aankleedtafel is een hulpmiddel voor het ergonomisch verantwoord wassen onder stromend water en/of verzorgen van mensen met een slechte zitbalans. De douchebrancard/aankleedtafel is gebruiksvriendelijk, onderhoudsvriendelijk, heeft een fraai uiterlijk, is ruim in hoogte te bedienen en bovenal veilig voor de gebruiker en de verzorger. Het wandgedeelte is elektrisch omhoog en omlaag te bewegen en is multifunctioneel te gebruiken. Door deze, ruim in hoogte verstelbare douchebrancard/aankleedtafel, op de ideale hoogte te positioneren kan een gemakkelijke overdracht gerealiseerd worden vanuit andere hulpmiddelen zoals bedden, brancards, douche/toilet- en rolstoelen.

Garantie

Wij, Lopital Nederland B.V., zijn trots dat u voor een kwaliteitshulpmiddel heeft gekozen. Jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van bad-, toilet- en douchehulpmiddelen heeft Lopital Nederland B.V. tot toonaangevend bedrijf op dit gebied gemaakt. De douchebrancard / aankleedtafel voldoet aan de CE-veiligheidsnormen. Deze normen zijn conform de richtlijn medische hulpmiddelen van 14 juni 1993 no. 93/42 EEG. Op douchehulpmiddelen geeft Lopital Nederland B.V. een fabrieksgarantie van 2 jaar. Normale slijtage en onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie. Lopital Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door oneigenlijk gebruik van de douchebrancards.

Veiligheid

Zorg ervoor dat de douchebrancard/aankleedtafel geïnstalleerd wordt volgens de bijgevoegde tekeningen en voorschriften. Laat de douchebrancard/aankleedtafel bij voorkeur installeren door een erkend vakman. De douchebrancard kan alleen bevestigd worden aan een muur van voldoende sterkte. In alle andere gevallen dient u een versteviging van voldoende sterkte aan te brengen of met contraplaten de douchebrancard/aankleedtafel aan de muur te bevestigen (alleen bij muren met voldoende dikte). Als oplossing voor te zwakke muren kan Lopital Nederland B.V. ook een losse console leveren. Deze wordt dan bevestigd tussen de vloer en het plafond.

Bij vragen en in geval van storingen dient u contact op te nemen met Lopital Nederland B.V. E-mail: service@lopital.nl.




Attentie: Bij het op- en neerklappen van de brancard en/of het zijhek het scharnierpunt ontwijken i.v.m. klemming van de vingers.

Kenmerken

- Hoog-laagwandgedeelte is universeel te gebruiken
- Groot bereik: 60 cm
- Laagste positie van ligvlak ca. 40 cm boven de vloer
- Grote hefsnelheid
- Moderne vormgeving
- Lage geluidsproductie
- Eenvoudig te reinigen door vlakke oppervlakten
- Geen scherpe randen of uitstekende delen
- Brancard is gemakkelijk op te klappen

Noodstop

- Onder de brancard/aankleedtafel is op de controlbox een noodstop bevestigd.
- Druk de noodstop in bij een noodgeval waarbij direct de stijgende of dalende beweging gestopt moet worden.
- Nadat de noodstop is ingedrukt werkt de hoog-laagbediening niet meer.
- Draai de noodstopknop een kwartslag rechtsom, zodat deze weer ontgrendeld wordt om zo de bediening te hervatten.

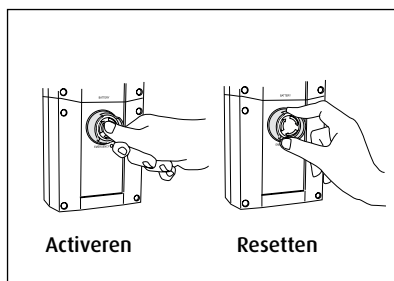



Opklappen van de douchebrancard/aankleedtafel

Wanneer de douchebrancard/aankleedtafel opgeklapt moet worden dient men eerst het zijhek neer te klappen. Bij het neerklappen van de douchebrancard/aankleedtafel dient men de douchebrancard/aankleedtafel naar voren te halen en het zijhek op te klappen. Deze valt vanzelf in zijn vergrendeling.



Bediening van het zijhek

- Als optie kan de douchebrancard/aankleedtafel worden voorzien van een zijhek.
- Het zijhek is uitgevoerd met een hekbeveiliging, zodat de gebruiker niet zelfstandig het zijhek kan lichten.
- Voordat het zijhek omlaaggeklapt kan worden dient de hekbeveiliging ontgrendeld te worden.
- Ontgrendel de beveiliging door het uitstekende lipje (1) met één hand naar buiten te trekken en met de andere hand het zijhek in het midden op te lichten.
- Draai het ontgrendelde hek naar buiten.
- Met neergeklapte zijhekken kan de verzorger in het midden tegen de brancard/aankleedtafel leunen om de gebruiker beter te kunnen verzorgen.
- Draai het zijhek weer naar boven om het zijhek op te klappen. Het hek vergrendelt zich automatisch.
- 61002400/01: Zorg ervoor dat de hoekflappen naar binnen vallen, zodat ze niet bekneld raken in de vergrendeling van het hek.

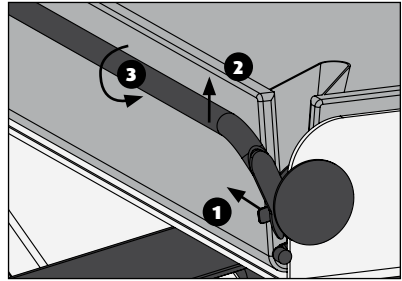
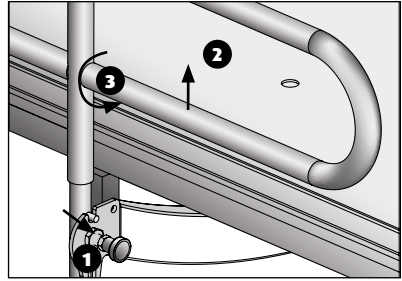


Waterafvoer

Via de afvoerslang wordt het water uit de douchebrancard naar een afvoer geleid. Leid de afvoer naar een laag gelegen afvoerpunt.

Accu verwisselen

- Wanneer alle kaders op de display van de controlbox zwart zijn is de accu volledig geladen.
- Zodra er een stekkersymbool verschijnt, dient de accu gewisseld en opgeladen te worden.
- Om de accu te verwijderen dient met één hand de pal (1) op de accu ontgrendeld te worden waarna de accu naar wordt afgenomen (2).
- Voor het plaatsen van de volgeladen accu dient de accu eerst tegen de behuizing van elektronica te worden geplaatst om deze vervolgens in de houder te klikken.

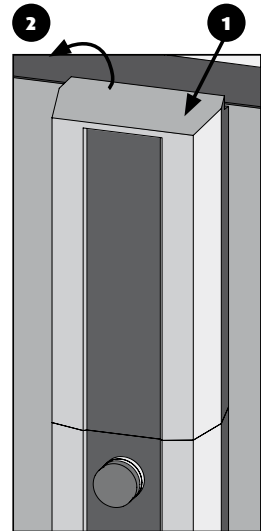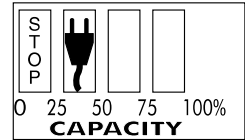

Opmerkingen: Zorg ervoor dat de brancard/aankleedtafel altijd klaar is voor gebruik door een volgeladen reserve accu gereed te hebben.

Accu opladen

- Plaats de lege accu op de acculader.
- Een groene lamp geeft aan dat de acculader ingeschakeld is. Een oranje lamp geeft aan dat de accu opgeladen wordt. De lamp gaat uit als de accu vol is.
- De geladen accu kan op de acculader blijven staan zonder dat er schade ontstaat.
- Om de accu te verwijderen dient met één hand de pal op de accu ontgrendeld te worden terwijl met de andere hand de accu ondersteund wordt.

Opmerkingen: Gebruik alleen de accu's die bij de brancard/aankleedtafel zijn geleverd. Laad accu's die niet gebruikt worden om het half jaar op om beschadiging te voorkomen. Door de accu op te laden voordat deze helemaal leeg is wordt de levensduur verlengd.



Belangrijk!

Gebruik de acculader nooit in de badkamer of in een vochtige omgeving!

Onderhoud

- De douchebrancard/aankleedtafel dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen (zoals chloor).
- Als de brancard/aankleedtafel gedesinfecteerd moet worden adviseren wij u Neoquat combi®. Gebruik hiervoor geen oplossing met alcohol.
- Verwijder overtollige zeepresten.
- Voor optimaal en efficiënt reinigen van de matras en het ligvlak kan de matras opgetild en weggenomen worden (alleen 61002400/01).
- Maak de onderplaat waar de matras op ligt droog (alleen 61002400/01).
- Zorg ervoor dat de accu is opgeladen.
- Lopital Nederland B.V. adviseert om een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten voor de douchebrancard/aankleedtafel.
- Onderhoud en reparatie alleen door geautoriseerd personeel uit te voeren.

Technische gegevens

Maximaal toelaatbare belasting:	135 kg
Eigen gewicht:	62005005/10 85 kg
	65005015/20 75 kg
	61002400/01 80 kg

Gegevens wandgedeelte

Wandframe	Staal electrolytisch verzinkt
Hoog-laag profielen	RVS kokerprofiel
Ophangpunten brancard	RVS, gepoedercoat
Schroefdelen	RVS
Kunststof afdekkap	ABS
Hefvermogen	135 kg
Slaglengte	600 mm
Snelheid	minimaal 14 mm/s bij maximale belasting

Gegevens aandrijving

Opgenomen vermogen	120W
Aandrijving werkt met lage spanning	24VDC
Beschermingsfactor	IP 66

Installeren

Bepalen van de werkhoogte

De douchebrancard/aankleedtafel voorziet de verzorger van een ergonomisch optimaal gebruik door een verstelbaarheid in hoogte van 60 cm. De minimale hoogte van het ligvlak is 40cm vanaf de vloer, de maximale hoogte van het ligvlak is afhankelijk van de hoogte van de badkamer. Maximale hoogte ligvlak brancard = hoogte badkamer (minimaal 230 cm) – 130 cm. Teken het gatenpatroon af op de muur volgens de bijgevoegde installatietekening. Geadviseerd wordt om de onderste twee gaten op een hoogte van 77 cm af te tekenen vanaf de tegelvloer, waardoor er een werkhoogtebereik van het ligvlak ontstaat van 40 - 50 cm tot 100 - 110 cm vanaf de tegelvloer.

Vorbereidingen t.b.v. plaatsing

- De wand waaraan de douchebrancard/aankleedtafel gemonteerd moet worden, dient minimaal 2,3 m breed en 2,3 m hoog te zijn en vrij van obstakels.
- Teken op de badkamermuur een loodlijn, daar waar het midden van de douchebrancard/aankleedtafel moet komen. Houd minimaal 1,15 m aan beide zijden van deze lijn vrij van obstakels.
- Boor de afgetekende gaten in de muur.

Monteren aan de wand

- Bevestig het wandframe met de voor deze wand geschikte bevestigingsmiddelen. Zorg ervoor dat de kokers van het wandframe waterpas hangen.
- Indien u de 61002400/01 heeft besteld, monteer dan eerst het vaste zijhek aan de zwarte platen van het wandframe.
- Monteer de douchebrancard/aankleedtafel aan het wandframe. Bevestig eerst de gasveren en daarna de scharnierpunten.
- Monteer de afdekkap als laatste en controleer of de kap nergens tegen de muur, plafond, vloer of plint aanloopt, kabels niet klem komen te zitten en of de douchebrancard/aankleedtafel nergens een obstakel tegenkomt.



Voor een douchebrancard moet in de (bad)kamer een afvoer van min. \varnothing 40 mm onder de brancard aanwezig zijn.

Buiten de badkamer te monteren:

Acculader met wandplaat in nabijheid van een wandcontactdoos 230V (AC).

Installatietekening

