

Elexo douche-toiletstoel


Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 180 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Voorsluiting gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.



02. Bedieningspaneel

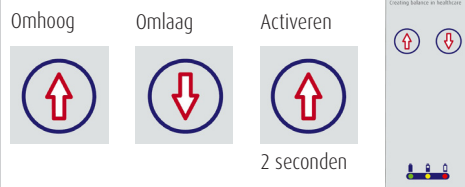

5100 5500
Elexo




03. Gebruik

1. Activeer de Elexo door middel van de omhoogknop 2 seconden in te drukken. Let op: Na gebruik gaat de Elexo binnen 60 minuten in slaapstand.
2. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
3. Zet de stoel op de rem!
4. Open de armleggers en klap deze zo nodig omhoog.
5. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
6. Sluit de armsteunen en laat de voeten van de cliënt op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.


04. Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

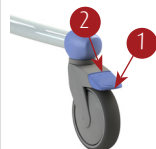

05. Voetensteun

Beide voetplaten dienen weggeklapt te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Dit kan door middel van het opklappen van de voetplaten (1) of door het wegdraaien van beide steunen (2). Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

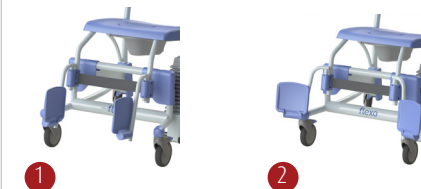

06. Opladen accu

Sluit de Elexo na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de batterijen. Tijdens het laden werkt de Elexo niet.



Uit
Groen
Knippert oranje
Oranje
Knippert rood
Rood


Slaapstand
Stoel bedrijfsklaar
Noodstop is geactiveerd
Batterij is half leeg
Batterij bijna leeg
Batterij leeg

07. Toiletfunctie

- Verwijder voordat de persoon met beperking plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* de Elexo kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Elexo kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.


08. Nooddaal & daalknop

1. Activeer de noodstop bij een noodgeval waarbij direct de stijgende of dalende beweging gestopt moet worden.
2. Wanneer de daalknop wordt geactiveerd bij een noodsituatie, zakt de stoel naar de laagste positie.

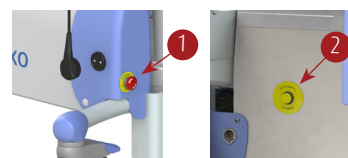

09. Armlegger met voorsluiting

1. Ontgrendelen.
2. Roteren.
3. Opklappen.

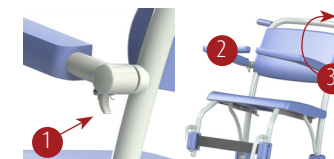

10. Reiniging en onderhoud

De Elexo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Elexo volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl

