

Eleexo XXL douche-toiletstoel


Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 220 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliententransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Armsteunen gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.



02. Bediening

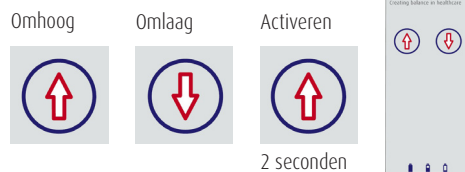

5100 5300
Eleexo XXL



03. Gebruik

1. Activeer de Eleexo XXL door middel van de omhoogknop 2 seconden in te drukken. Let op: Na gebruik gaat de Eleexo XXL binnen 60 minuten in slaapstand.
2. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
3. Zet de stoel op de rem!
4. Open de armsteunen en klap deze zo nodig omhoog.
5. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
6. Sluit de armsteunen en laat de voeten van de cliënt op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

04. Wielblokkering


1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

Richtingswiel
1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.



05. Nooddaal & daalknop

1. Activeer de noodstop bij een noodgeval waarbij direct de stijgende of dalende beweging gestopt moet worden.
2. Wanneer de daalknop wordt geactiveerd bij een noodsituatie, zakt de stoel naar de laagste positie.

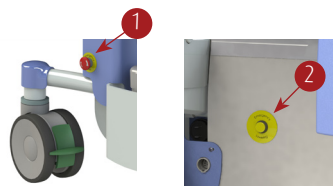

06. Opladen accu

Sluit de Eleexo XXL na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de batterijen. Tijdens het laden werkt de Eleexo XXL niet.



Uit
Groen
Knippert oranje
Oranje
Knippert rood
Rood

Slaapstand
Stoel bedrijfsklaar
Noodstop is geactiveerd
Batterij is half leeg
Batterij bijna leeg
Batterij leeg

07. Afneembare zitting




08. Armlegger zonder voorsluiting

1. Ontgrendelen.
2. Naar achter draaien. Sluiten in omgekeerde volgorde



09. Voetensteun

Beide voetsteunen dienen weggedraaid te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

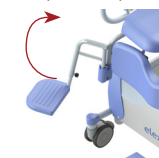

10. Toiletfunctie

- *In combinatie met toilet:* De Eleexo XXL kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Eleexo XXL kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

11. Reiniging en onderhoud

De Eleexo XXL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Eleexo XXL volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

INSCCS300-2026-01 NL