



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Periodiek preventief
onderhoud en inspectie

Lotus, Lotus compact & Lotus XL
opstahulp

Lotus
59008200



Lotus compact
59008250



Lotus XL
59008270



Belangrijk!

De Lotus/Lotus compact/Lotus XL moet periodiek, minstens 1 keer per jaar, worden geïnspecteerd.

Service en onderhoud aan de Lotus/Lotus compact/Lotus XL is alleen toegestaan door daartoe door Lopital geautoriseerde personen en met originele reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Lotus/Lotus compact/Lotus XL aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Lotus/Lotus compact/Lotus XL voldoet hierdoor niet meer aan de verordening medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745.

Elke inspectie of reparatie dient te worden genoteerd in het logboek.

De gemiddelde technische levensduur van de Lotus/Lotus compact/Lotus XL is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Inhoudsopgave

1.	Algehele staat van de Lotus/Lotus compact/Lotus XL	4
2.	Wielen	5
3.	Voetplaat	6
4.	Zitschalen	7
5.	Pootspreiding	8

1. Algehele staat van de Lotus/Lotus compact/Lotus XL
2. Wielen
3. Voetplaat
4. Zitschalen
5. Pootspreiding

C= Controleren

S= Smeren

A= Aanbevolen vervanging (of delen vervangen)

V= Vervangen (of delen vervangen)



Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Wielen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Voetplaat	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zitschalen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pootspreiding	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

1. Algehele staat van de Lotus/Lotus compact/Lotus XL

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

- Lakstift Sikkens A77A2

- Controleer of alle stickers nog aanwezig en leesbaar zijn.
 - Serienummersticker:
 - Is het serienummer nog leesbaar?
 - Is de datamatrix nog leesbaar voor een scanner?
 - Is het CE logo nog zichtbaar?
 - Keuringssticker:
 - Is de keuringsdatum nog leesbaar?
 - QR sticker:
 - Is de QR-code nog leesbaar voor een QR scanner?
- Controleer alle gelakte onderdelen visueel op beschadigingen en roestvorming. Indien nodig bijlakken.
- Controleer de het PUR onderdeel (de onderbeensteun) op ernstige verkleuring en op beschadigingen.
- Controleer of de onderbeensteunen goed vastzitten.
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.


Bij beschadiging van de PUR delen deze altijd vervangen, in verband met de hygiëne.

2. Wielen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 8mm
- Inbussleutel 6mm

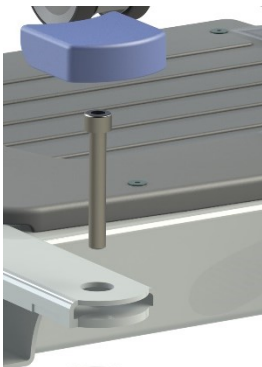

Figuur 1 Geremd wiel



Figuur 2 Ongeremd wiel

- Controleer de bevestiging van het wiel (speling).
- Controleer de werking van vrijloop + remmen.
- Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. Zo niet, controleer de Lotus/Lotus compact/Lotus XL op rechtloop.
- Controleer of het remlipje intact is.
- Controleer het loopvlak.

Indien er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vervang het wiel.


3. Voetplaat

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

-

- Controleer op beschadigingen. Bij breuken of scheuren de voetplaat altijd vervangen.
- Controleer of de 4 schroeven nog aanwezig zijn.

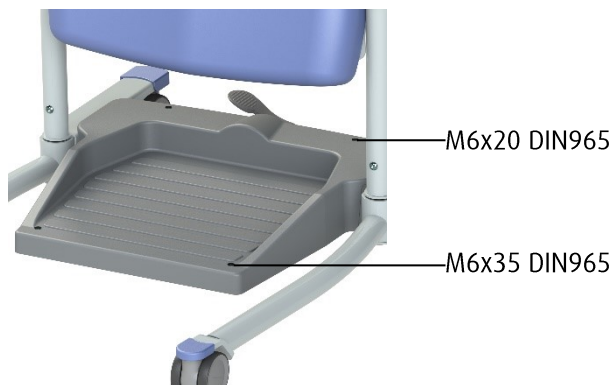

Figuur 3 Voetplaat

4. Zitschalen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C


Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 5mm
- Kruiskop schroevendraaier

- Controleer de zitschalen op beschadigingen.
- Draai de zitschalen omhoog en weer terug. Bepaal of de zitting comfortabel draait.
- Controleer of de zitschalen gelijk staan. Zo niet, controleer de bevestiging.
- Controleer of de zitschalen in beide standen goed geborgd worden.



Figuur 4 Zitschalen

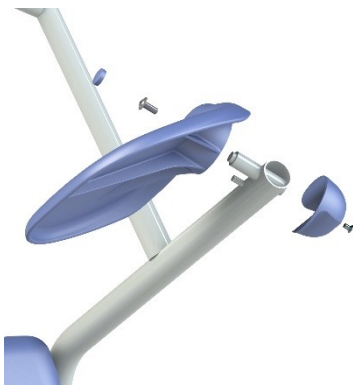

Figuur 5 EV zitschalen


5. Pootspreiding

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C


Benodigd gereedschap

-



- Controleer de werking van de pootspreiding, worden de poten in beide standen goed geborgd?
- Controleer de bevestiging van het pedaal.
- Controleer het pedaal op beschadigingen.
- Controleer of de 4 borgclips aanwezig zijn.

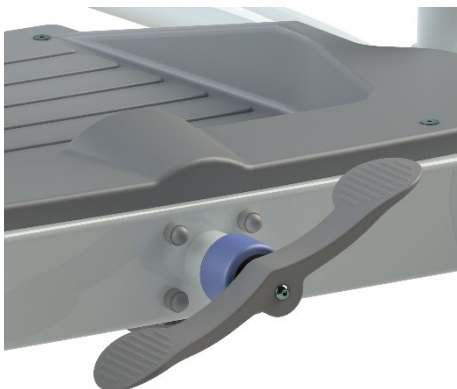


Figuur 6 Pedaal pootspreiding

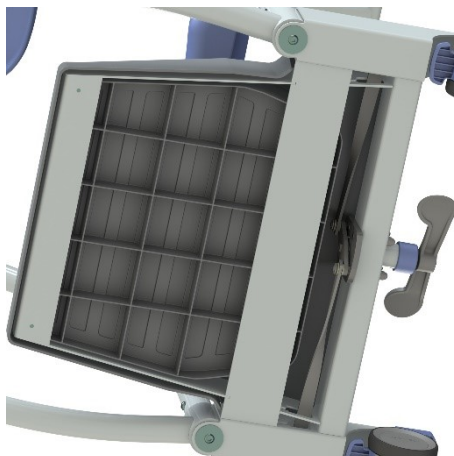

Figuur 7 Pootspreiding

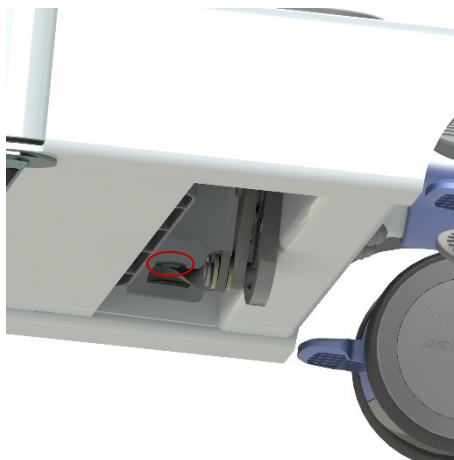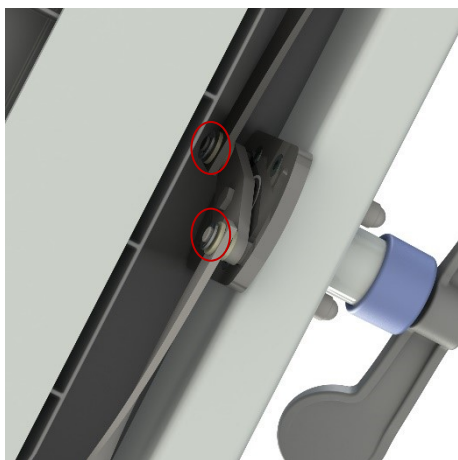

Figuur 8 & 9 Borgclips (4x)

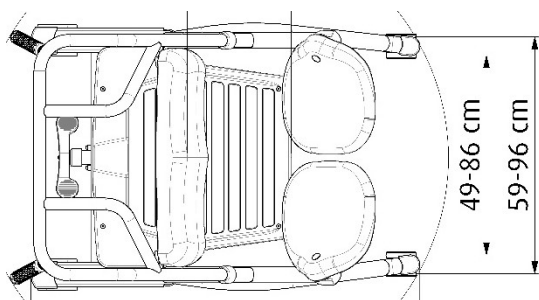

Figuur 10 Verstelling pootspreiding

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon +31 (0)13 5239300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.

 lopital®		MD _____	
Laarakkerweg 9		REF _____	
5061 JR Oisterwijk		SN _____	
The Netherlands			
T: (031)13-5239300		 --- KG/--- LBS	
IPX-		 _____	
Weight: -- kg		CE	(01)-----
Type battery: ---		Revision -	(11)-----
Drives operates: -- V			(21)---,---,---
Charge: ---V--- mA			
Non continuous: -----			



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be