

Amfora & Stylex douchebrancard & Vienna aankleedtafel


Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 150 kg (Amfora/Vienna) & 135 kg (Stylex).
- Zorg ervoor dat de Amfora/Stylex/Vienna op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de brancard / aankleedtafel



02. Bediening (Amfora/Vienna)

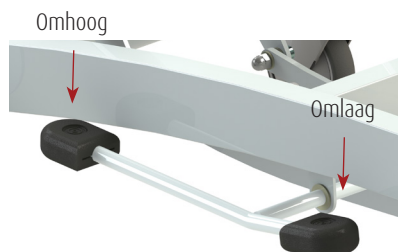

6200 4015

Amfora



6500 4025

Vienna




6100 3070

Stylex




03. Bediening (Stylex)

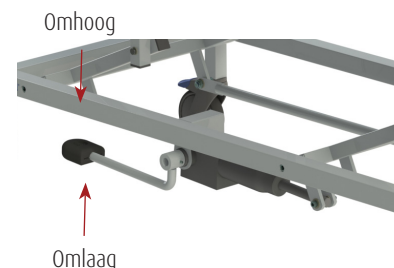


06. Zijkhek

1. Ontgrendelen
2. Beweeg het zijkhek naar de gewenste stand

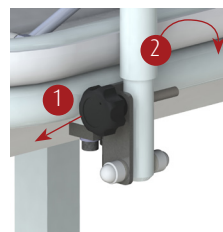

06. Waterafvoer (Amfora/Stylex)

Via de afvoerslang wordt het water naar een afvoer geleid.

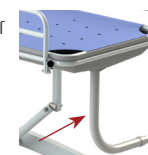

07. Reiniging en onderhoud

De Amfora/Stylex/Vienna dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Amfora/Stylex/Vienna volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.

Tel: +31 (0) 13-5239300

E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
 Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
 9001 - 13485 - 14001

INSCC4015-2026-01 NL