



Veiligheidsvoorschriften


- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 150 kg (Amfora/Vienna) & 135 kg (Stylex).
- Zorg ervoor dat de Amfora/Stylex/Vienna op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de brancard / aankleedtafel




Bediening (Amfora/Vienna)



Bediening (Stylex)

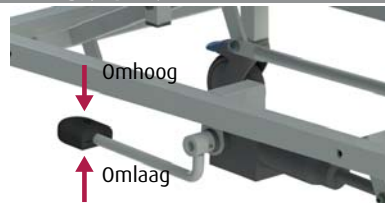


Wielblokkering

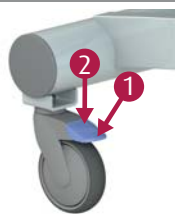

1. Wielblokkering
2. Ontgrendelen

Zijhek

1. Ontgrendelen
2. Beweeg het zijhek naar de gewenste stand

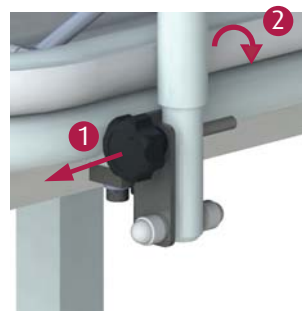

Waterafvoer (Amfora/Stylex)

Via de afvoerslang wordt het water naar een afvoer geleid.



Reiniging en onderhoud

De Amfora/Stylex/Vienna dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kan het matras met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding. (www.lopital.nl)

Volgens de verordening voor medische hulpmiddelen moet de Amfora/Stylex/Vienna volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital. (www.lopital.nl)

In geval van storing contact opnemen met Lopital.

Tel: +31 (0) 13-5239300

E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl



Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!