

Vienna douchebrancard

Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 227 kg (Deluxe) en 150 kg (Basic)




02. Bedieningspaneel

Omhoog Omlaag Rug omhoog Rug omlaag




03. Zijhek

1. Ontgrendelen (trek aan de hendel (1))
2. Beweeg het zijhek naar de gewenste stand: gesloten / breed / open (2).

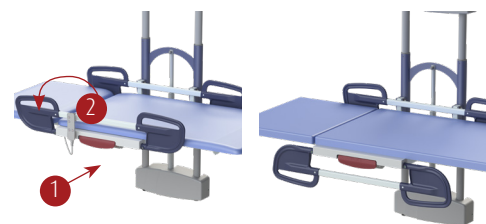

6500 5030
Vienna Deluxe

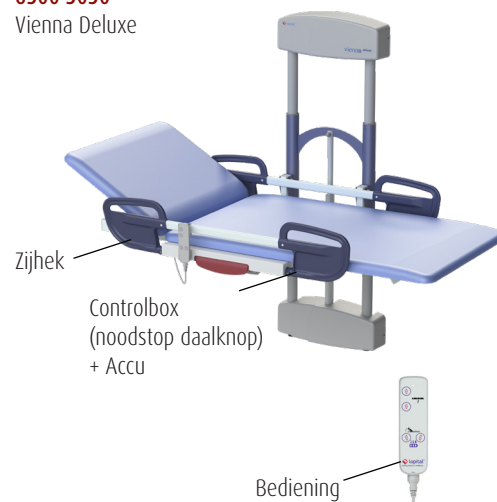

6500 5035
Vienna Basic



04. Opklappen ligvak

Het ligvak is eenvoudig omhoog te klappen, om ruimte te besparen.



05. Opladen accu

Laad de accu op voordat deze helemaal leeg is, voor behoud van de accu.

Accu indicatie te vinden op handbediening.



volledig geladen



1/3 capaciteit, opladen geadviseerd




2/3 capaciteit



opladen vereist, er klinkt een akoestisch signaal

06. Noodstop & daalknop

1. Activeer de noodstop bij een noodgeval waarbij direct de stijgende of dalende beweging gestopt moet worden.

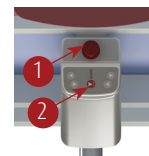

2. Wanneer de daalknop wordt geactiveerd bij een noodsituatie, zakt de brancard naar de laagste positie.

07. Reiniging en onderhoud

De Vienna dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Vienna volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

INSCC5030-2026-01 NL