

# LUNA<sup>®</sup> X5

## Instructiekaart

### Handbediening

#### On


Het groene lampje brandt wanneer de lift actief is. Alle lampjes gaan uit nadat ze ongeveer 3 minuten niet zijn gebruikt.

#### Omhoog

#### Omlaag

#### Reset

5 seconden ingedrukt houden om de noodstop uit te schakelen. Het lampje gaat uit en alle knoppen werken weer.

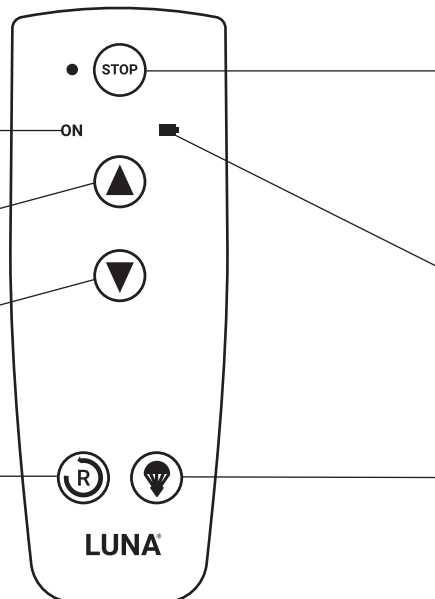

#### Noodstop

**Indrukken om de noodstop te activeren.** Rood licht geeft activering aan. Houd de resetknop ingedrukt om de noodstop uit te schakelen.

#### Batterij

- Groen: 100%
- Oranje: 50% (opladen wordt aanbevolen)
- Rood: Moet worden opgeladen

#### Nooddaling

**Als Omhoog/Omlaag niet werkt.** Houd de knop voor nooddaling ingedrukt; het dalen begint na 5 seconden. Tijdens het laten zakken klinkt een constante pieptoon.

#### Belangrijk

##### Laad de LUNA<sup>®</sup> X5 op als u deze niet gebruikt:

- De handbediening in het laadstation plaatsen.
- De kabel van de oplader aansluiten op het zijpaneel.


Als het trackstelsel is uitgerust met ITC (In-Track Charging), gebeurt het opladen automatisch.

#### Nooddaling

##### Als de elektrische noodverlaging niet werkt.

Gebruik de handmatige noodaalfunctie volgens deze stappen:

- a. Trek de noodsleutel uit die zich aan de zijkant van de LUNA<sup>®</sup> X5 bevindt.
- b. Steek de handmatige noodsleutel in het sleutelgat.
- c. Draai de handmatige noodsleutel linksom om hem handmatig te laten zakken.

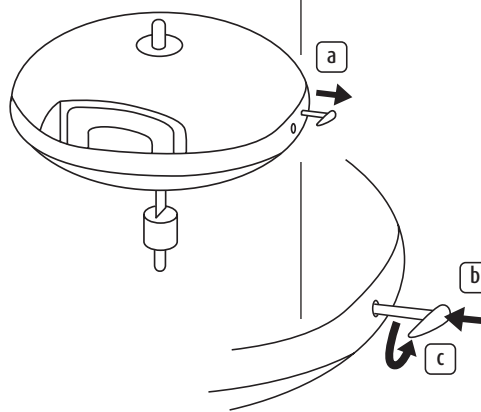

**Gebruik de verstelbare hoogte van het bed om de transfer te vergemakkelijken**



**Trek niet aan de kabel van de handbediening om de plafondlift te verplaatsen**




**Zorg ervoor dat je de juiste slingmaat gebruikt voor de gebruiker**



Scan for information

# Zijpaneel

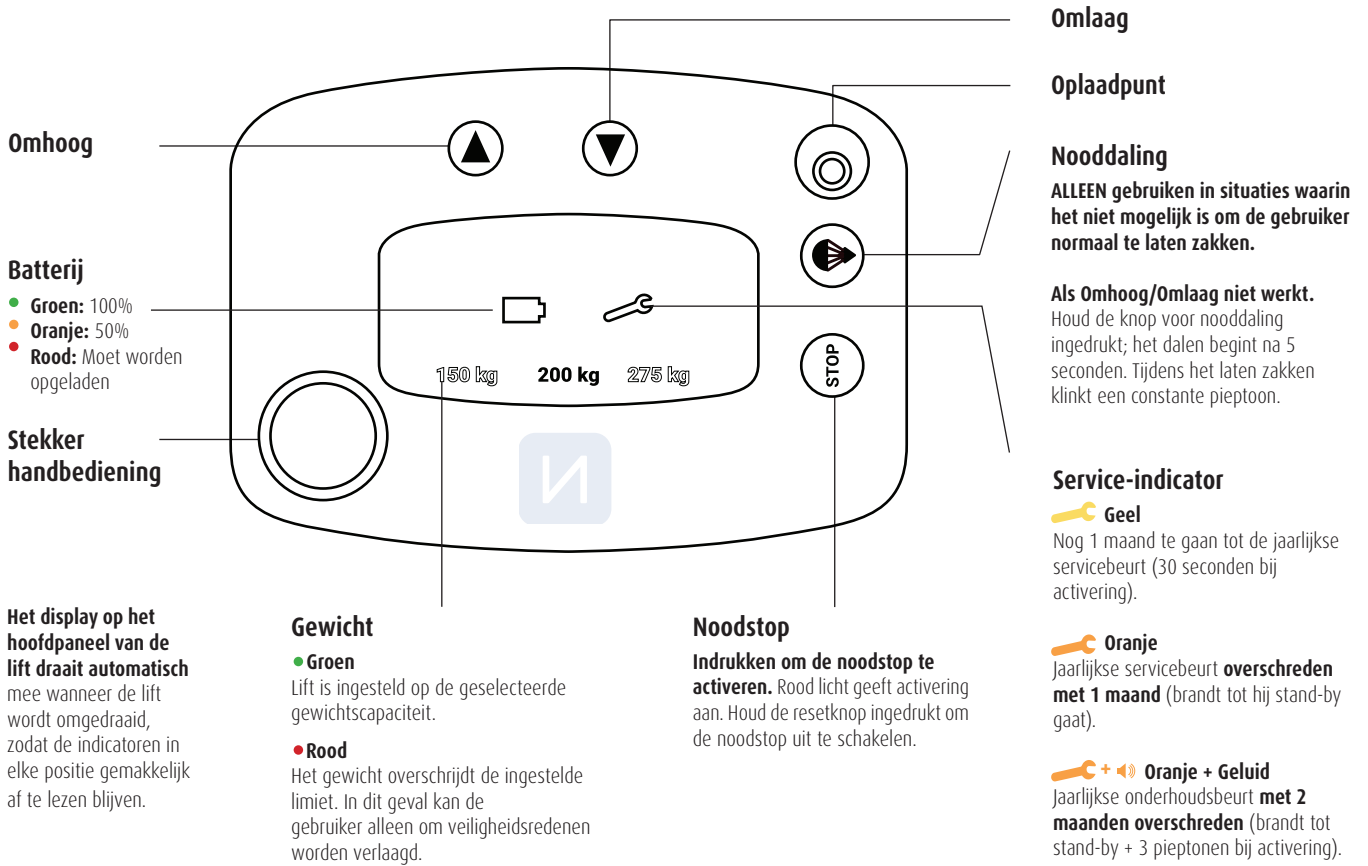

## Hoe verplaats je de lift van de ene kamer naar de andere kamer

Om uw lift van vaste naar draagbare modus te schakelen, draait u de lift gewoon ondersteboven. (of andersom)

