

Flexo douche-toiletstoel


Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 150 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Voorsluiting gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.



02. Bediening Hydraulisch

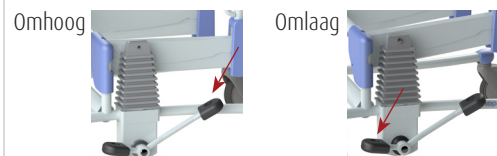


03. Gebruik

1. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
2. Zet de stoel op de rem!
3. Open de armleggers en klap deze zo nodig omhoog.
4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
5. Sluit de armleggers en laat de voeten van de persoon met beperking op de voetplaten rusten.
Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

04. Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

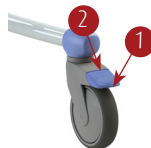


5100 5199

Flexo



05. Voetensteun

Beide voetplaten dienen weggeklapt te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Dit kan door middel van het opklappen van de voetplaten (1) of door het wegdraaien van beide steunen (2). Zorg ervoor dat de cliënt met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

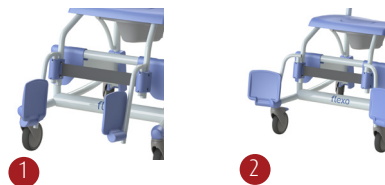

06. Armlegger met voorsluiting

1. Ontgrendelen.
2. Roteren.
3. Opklappen.



07. Toiletfunctie

- Verwijder voordat de cliënt plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* de Flexo kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Flexo kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

08. Reiniging en onderhoud

De Flexo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Flexo volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

INSCC5199-2026-01 NL