



Periodiek preventief
onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Marina Douchebrancard

Marina Douchebrancard

61002300 (hydraulisch, standaard)
 61002305 (hydraulisch, verbreed)
 61002305 (hydraulisch, centraal beremd)
 61002320 (hydraulisch, verkort)
 61002330 (hydraulisch, verlengd)
 61002345 (hydraulisch, verbreed en verlengd)

61002350 (elektrisch, standaard)
 61002355 (elektrisch, verbreed)
 61002360 (elektrisch, centraal beremd)
 61002370 (elektrisch, verkort)
 61002380 (elektrisch, verlengd)
 61002385 (elektrisch, verbreed en verlengd)



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor zorgverlener	4
Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur.....	5

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
 Laarakkerweg 9
 5061 JR Nederland
 T (0031) 13 52 39 300
 F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.com
 E-mail algemeen: info@lopital.nl
 E-mail service: service@lopital.nl

Introductie

Periodiek preventief onderhoud en inspectie


Om de Marina in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Marina moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Marina aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Marina voldoet hierdoor niet meer aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Alle werkzaamheden aan de Marina dienen te worden genoteerd in een logboek.

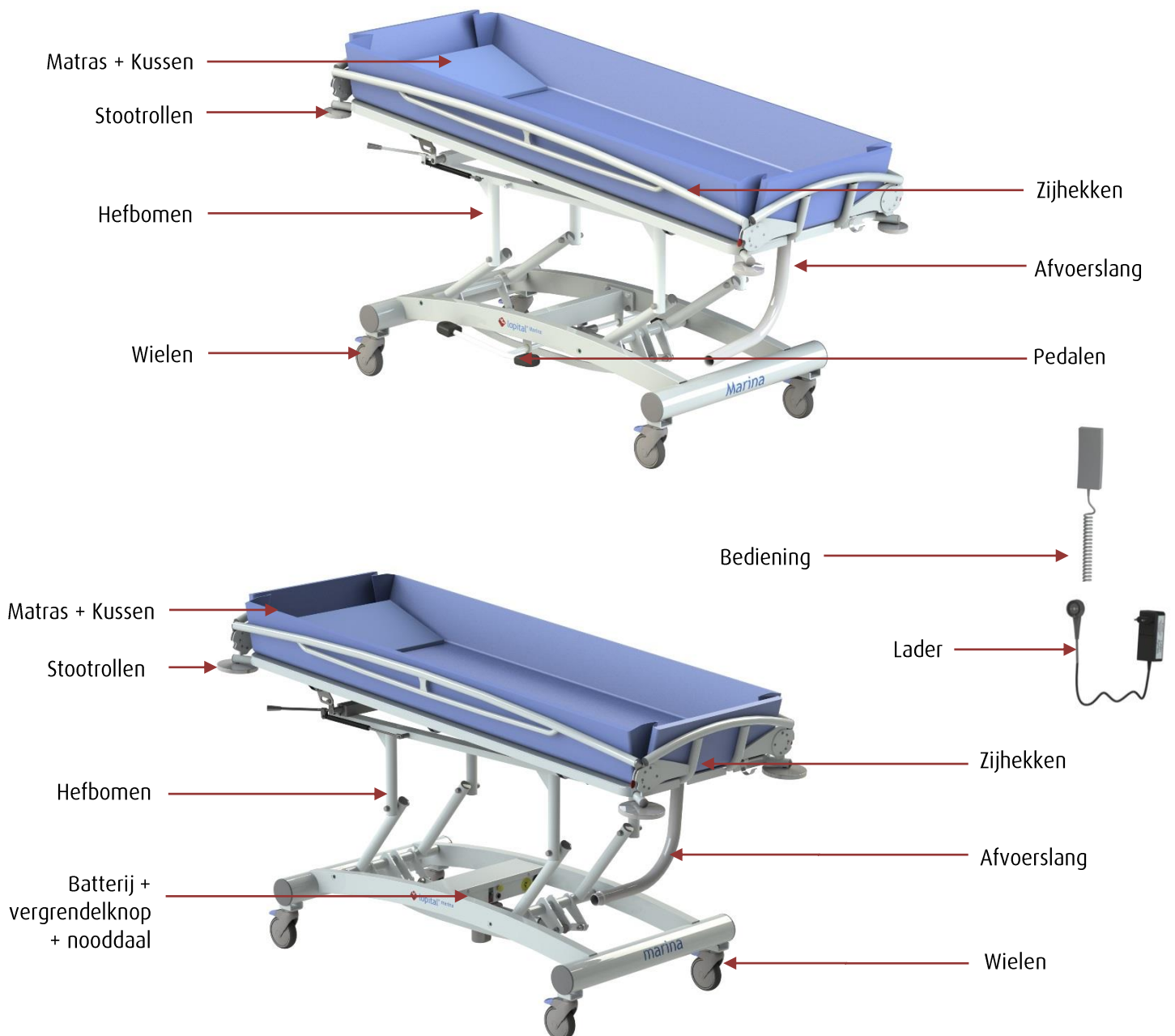

Onderhoudsschema voor zorgverlener

Preventief onderhoud uitgevoerd door zorgverlener

De Marina dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kan het matras met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden.

Voor optimaal en efficiënt reinigen van het matras en het ligvlak, kan de matras opgetild en weggenomen worden. Maak de onderplaat waar het matras op ligt droog.

Controleer regelmatig de wielen op haren en stof en verwijder deze waar nodig. Onderhoud en reparatie aan de Marina zijn alleen uit te voeren door geautoriseerd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • De matras reinigen en desinfecteren. • Brancard reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> • Frame reinigen. • Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig. • Controleren of de werking van de brancard nog goed is. • Laad de batterij minimaal 1 keer per week op.
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"> • Volgens de richtlijn medische hulpmiddelen moet een brancard volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Bij voorkeur dient dit te worden gedaan door Lopital. Lopital biedt de mogelijkheid om de brancard 1 keer per jaar grondig te inspecteren en onderhouden, middels het Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (service@lopital.nl) of met uw leverancier.



Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur

Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken.

• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen) R = Reinigen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat - Controleer of het logboek en gebruikershandleiding aanwezig zijn. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de brancard op beschadigingen / roestvorming. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten. - Indien insteekdoppen beschadigd zijn, deze vervangen. - Controleer of de bouten van de actuator goed vast zitten.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Actuatoren Controleer de actuatoren op beschadigingen en speling (Zowel visueel als gehoor)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wielen - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer of het remlijpje intact is. - Controleer het loopvlak.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Matras + kussen - Controleer de matras en kussen op beschadigingen, zo nodig vervangen. - Het is sterk aan te bevelen om elke 5 jaar de matras en kussen te vervangen, in verband met hygiëne.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Afvoerslang - Controleer de afvoerslang op knikken, lekken en verstopping. - Het is sterk aan te bevelen om elke 3 jaar de afvoerslang te vervangen, in verband met slijtage, verstopping en de hygiëne.	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Zijhekken - Controleer of de zijhekken soepel open en dicht gaan. - Controleer de vergrendeling. - Controleer of alle boutjes aanwezig zijn en vast zitten. - Controleer of het rode of zwarte dopje op het uiteinde van de hevel aanwezig is. - Het scharnier smeren.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bediening + vergrendelknop + nooddaalknop - Controleer alle functies. - Controleer de nooddaalknop en vergrendelknop. - Controleerde kabel van de handbediening, indien beschadigd, geknikt of erg opgerekt meteen vervangen. - Controleer de contacten van de controlbox op corrosie, indien gecorrodeerd schoonmaken en inspuiten met contactspray. - Haal de kabel van de actuatoren los en controleer ze op corrosie, knikken of beschadigingen. - Controleer de kabel van de handbediening, indien beschadigd geknikt of erg opgerekt, deze vervangen. - Het wordt aanbevolen de vergrendelknop elke 4 jaar te vervangen.	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Batterij + Lader - Haal de batterij los en controleer de contacten op vervorming en corrosie. - Controleer de batterij met de tester. - De lader dient elk jaar getest te worden volgens de NEN 3140. - Het is sterk aan te bevelen om elke 3 jaar de batterij te vervangen.	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•