

Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruikershandleiding (te vinden op: www.lopital.nl) vóór gebruik zorgvuldig door.
- Maximale belasting 200 kg.
- Zorg ervoor dat de Lotus op de rem staat tijdens personentransfers van en naar de Lotus.

Gebruik


1. Verrijd de Lotus naar de cliënt en draai de zitdelen weg.
2. Spreid indien nodig de poten van de Lotus en verrijd hem zo dicht mogelijk naar de cliënt toe.
3. Zet de Lotus op de rem.
4. Laat de cliënt opstaan en draai de zitting terug.
5. De cliënt kan nu gaan zitten.

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.



Wielblokkering

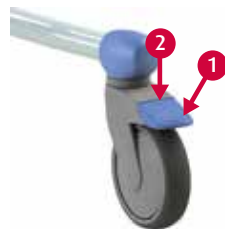

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

Pootspreiding



De Lotus is uitgerust met een mechanische pootspreiding. Door op 1 van de pedalen te trappen, zullen de poten naar binnen of naar buiten bewegen (afhankelijk van welk pedaal u kiest).

Wegdraaibare zitdelen



De Lotus is uitgerust met 2 comfortabele zitdelen die weggedraaid kunnen worden.

Reiniging en onderhoud

De Lotus dient dagelijks gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig.

Het volledige onderhoudsschema is te vinden in de gebruikershandleiding **(te vinden op: www.lopital.nl)**.

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: **www.lopital.nl**

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max 200 kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la Lotus.

Utilisation

1. Déplacez la Lotus en direction du client et retournez les éléments du siège.
2. Si nécessaire, étalez les pattes de la Lotus et déplacez-la aussi près que possible du client.
3. Verrouillez le frein de roues.
4. Soulevez le client et remettez le siège.
5. Le client peut maintenant s'asseoir.


Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.



Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

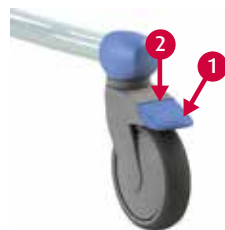

Piètement



La Lotus est équipée d'un système d'écartement des pattes mécanique. En appuyant sur l'une des pédales, les pattes rentreront ou sortiront (selon la pédale choisie).

Parties d'assise escamotables



La Lotus est équipée de 2 éléments de siège confortables qui peuvent être tournés.

Nettoyage et entretien

Quotidien la Lotus doit être nettoyée à l'eau avec des produits d'entretien ménagers courants. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant.

Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr