

Nemo douche-toiletstoel

Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 150 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de Nemo in een niet gekantelde positie.
- Tijdens het verrijden de Nemo niet kantelen.



02. Bediening

De Nemo is uitgevoerd met een kantelfunctie tot maximaal 30° achterwaarts.

1. Zet de stoel op de rem.
2. Ga schuin achter de Nemo staan en pak met de rechterhand de handgreep vast (1).
3. Houd met de linkerhand het frame van de hoofdsteun vast (2).
4. Door de bedieningshendel in te knijpen kan het stoelframe gekanteld worden.



5100 5199

Nemo




03. Gebruik

1. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
 2. Zet de stoel op de rem!
 3. Klap indien nodig de armsteunen omhoog.
 4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
 5. Sluit de armleggers en laat de voeten van de persoon met beperking op de voetplaten rusten.
- Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.*

04. Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

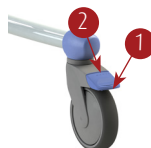


05. Voetensteun

Beide voetplaten dienen weggeklapt te zijn als de cliënt op de stoel gaat zitten. Dit kan door middel van het opklappen van de voetplaten (1) of door het wegdraaien van beide steunen (2). Zorg ervoor dat de cliënt met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.



06. Armsteun

1. Opklappen armsteun

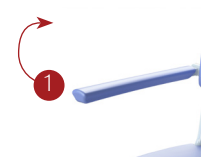

07. Toiletfunctie

- Verwijder voordat de cliënt plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* de Nemo kan over bijna ieder toilet gereden worden.
- *Met ondersteek:* De Nemo kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

11. Reiniging en onderhoud

De Nemo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Nemo volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
 Tel: +31 (0) 13-5239300
 E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
 Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl

