

Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 135 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetsteunen.
- Voorsluiting gesloten bij hoog/laag bewegen en armen op armsteunen laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.



Bediening

Omhoog



Omlaag



Voorwaarts kantelen




Achterwaarts kantelen



Activeren



Vergrendelknop

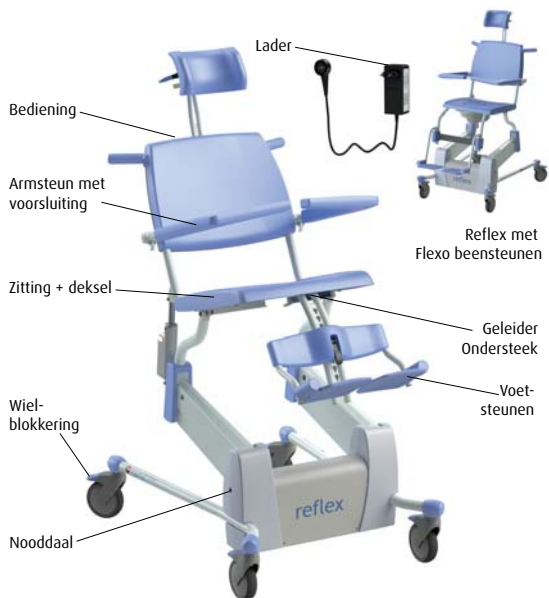


Gebruik

1. Activeer de Reflex door middel van de omhoog knop 2 seconden in te drukken. Let op: Na gebruik gaat de Reflex binnen 60 minuten in slaapstand.
2. Breng de stoel in de juiste positie, ook de hoofdsteen en klap de voetplaten omhoog.
3. Zet de stoel op de rem!
4. Open de armsteunen en klap deze zo nodig omhoog.
5. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
6. Sluit de armsteunen en laat de voeten van de cliënt op de voetplaten rusten.


Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde. Alle functies van de Reflex worden uitgeschakeld door middel van de vergrendelknop. De Reflex dient te worden gereset. Dit doet u door 4 seconden beide omhoogknoppen in te drukken.

Wielblokkering

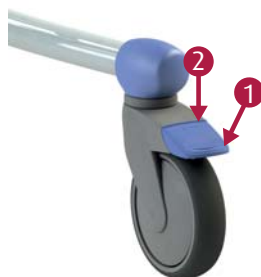

1. Wielblokkering
2. Ontgrendelen

Voetsteun

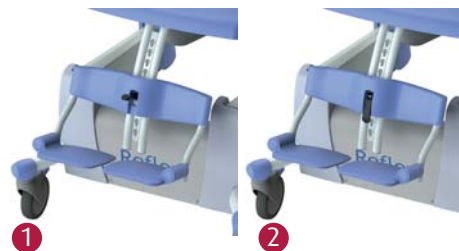


1. Ontgrendelen
2. Complete voetensteun afnemen
3. Gewenste positie kiezen
4. Inhaken en vergrendelen

Zorg ervoor dat de cliënt met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

Armsteun met voorsluiting

1. Ontgrendelen
2. Roteren
3. Opklappen

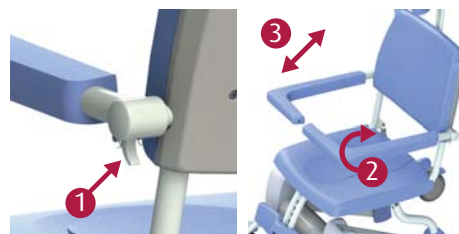

Opladen accu

Sluit de Reflex na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de accu's.



Uit
Groen
Knippert rood
Rood

Slaapstand
Stoel bedrijfsklaar
Accu is bijna leeg
Accu is leeg

Tijdens het laden werkt de Reflex niet.

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

Toiletfunctie

- Verwijder voordat de cliënt plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* De Reflex kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Reflex kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

Nooddaal

Als alle functies van de Reflex uitgevallen zijn, is het mogelijk de stoel te laten zakken met behulp van de nooddaal hendel.



Reiniging en onderhoud

De Reflex dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding. (www.lopital.nl)

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Reflex volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl)

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl

