


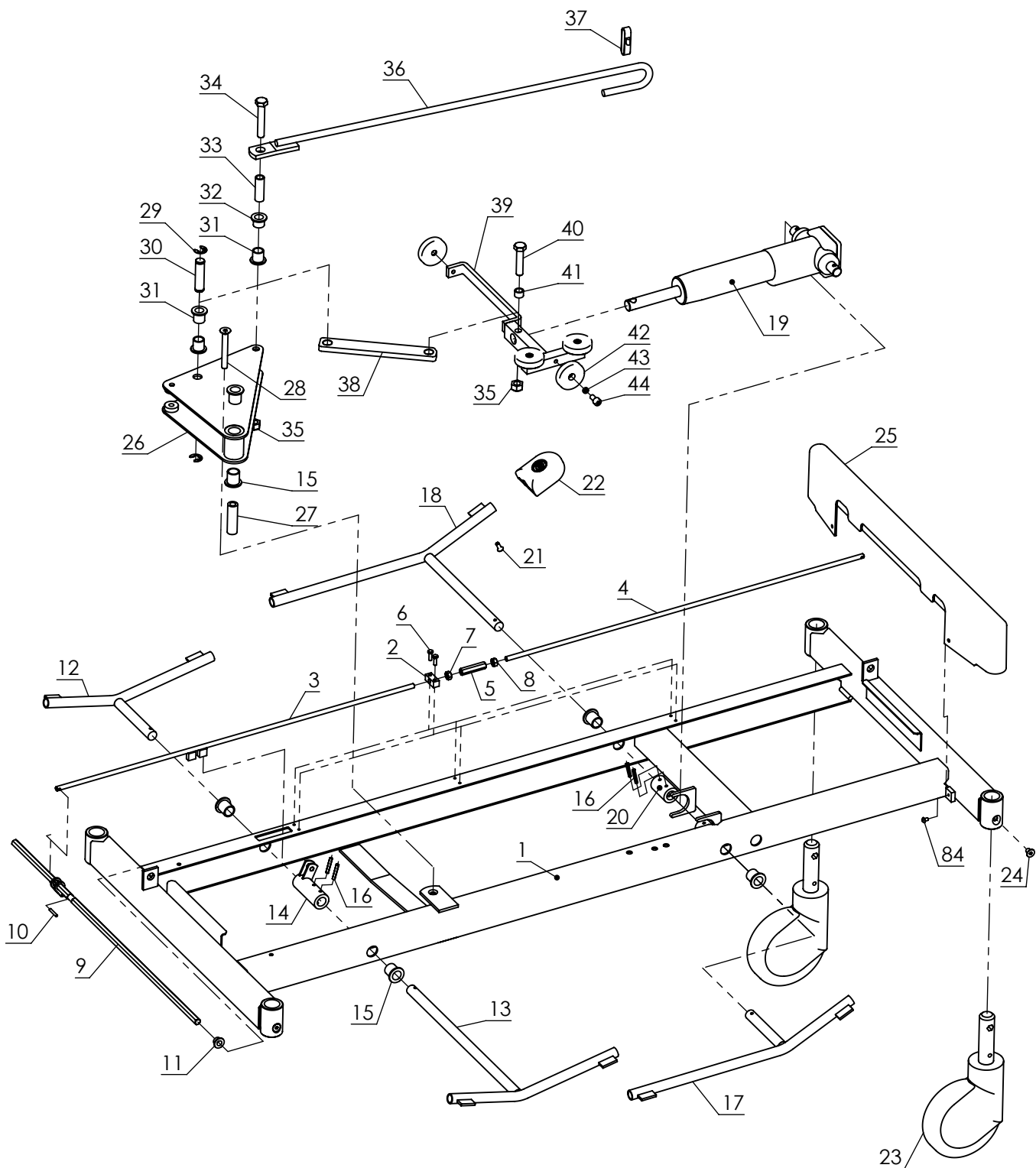

H:\SW-Tek\Mystral 2100\2100\


Getekend:	PS	Datum:	24-10-2005
Revisie:	3 /PS	Datum:	16-12-2008
Revisie:	2 /PS	Datum:	31-10-2006

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden	Maateenheid: mm
---	--------------------

Overzicht onderdelen

Lopital Nederland bv

Type nr: 61002100 -1

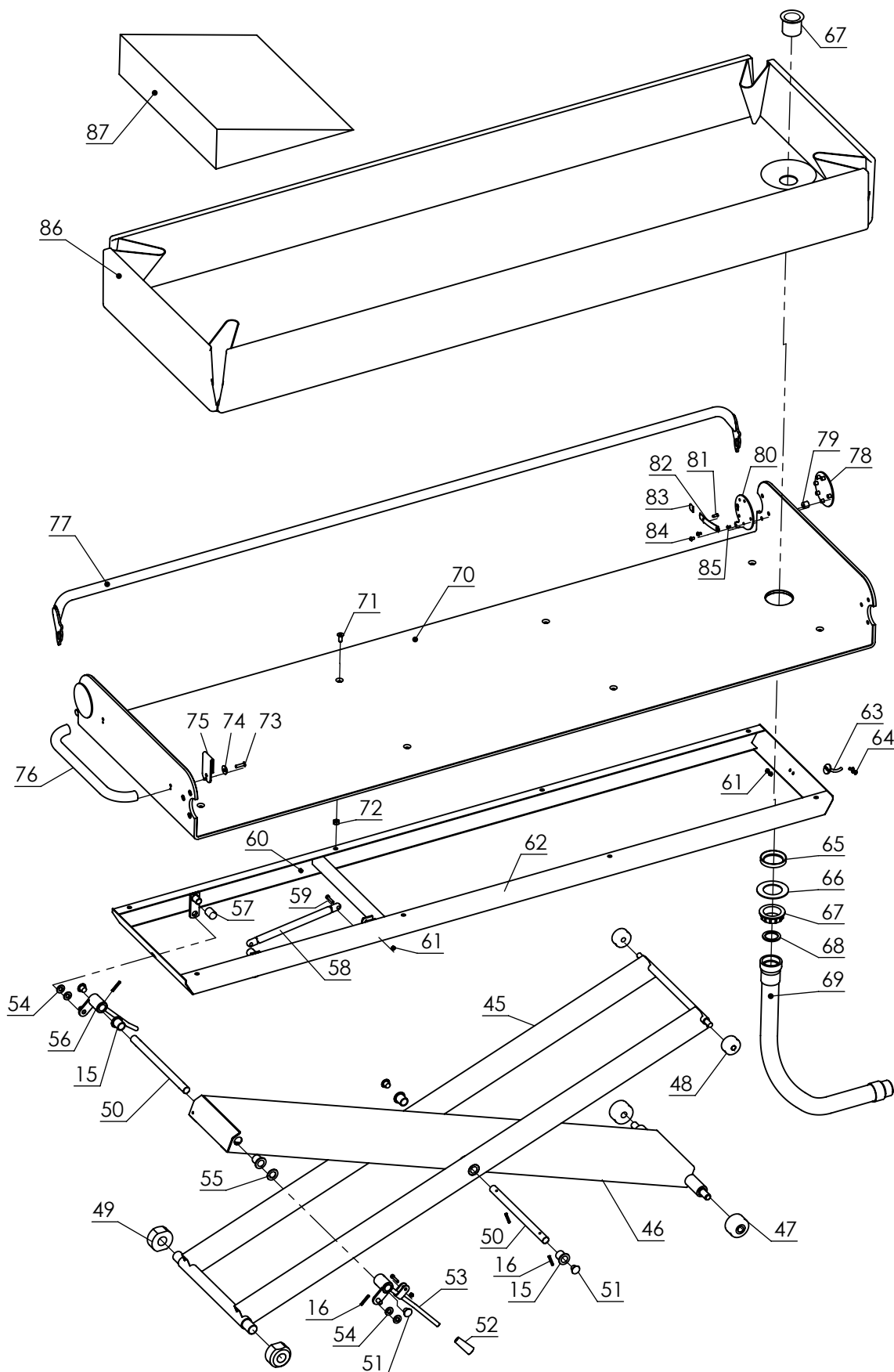

Getekend:	PS	Datum:	24-10-2005
Revisie:	3 /PS	Datum:	16-12-2008
Revisie:	2 /PS	Datum:	31-10-2006

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden	Maateenheid: mm
--	-----------------

Overzicht onderdelen

Lopital Nederland bv

Type nr: 61002100 -2

Mystral douchebrancard 61002100

Stuknr.	Art.nr.	Aantal	Naam	Materiaal	Opm./ Tek.nr.
1	70210001	1	Onderstel	St ELVZ	2100-11.4
2	70210014	3	Schuiflager	PA	2100-35.2
3	70210004	1	Koppelstang	St ELVZ	2100-12.5
4	70210005	1	Verlengstuk	St ELVZ	2100-33.3
5	70210003	1	Stelmoer	St 37 ELVZ	2200-21
6		6	Zeskantbout	A2	M5x16 DIN931
7		1	Zeskantmoer	A2	M8 DIN 934
8		1	Zeskantmoer	A2	M8 Links DIN 934
9	7021002	2	Pendelas	St ELVZ	2100-13.4
10		2	Cilindrische pen	A2	4x24 DIN 7
11		2	Glijlager met kraag		10x14x10
12	70210008	1	Rempedaal rechts	St ELVZ	2100-14.6
13	70210007	1	Rempedaal links	St ELVZ	2100-15.6
14	70210009	1	Remhefboom	St ELVZ	2100-16.4
15		10	Glijlager met kraag	PA	18x22x25
16		10	Kerfpen, conisch	A1	5x30 DIN1471
17	70210012	1	Hefpedaal rechts	St ELVZ	2100-22.6
18	70210011	1	Hefpedaal links	St ELVZ	2100-25.6
19	70210042	1	Pomp (hydraulisch)	St gec.	200mm
20	70210033	2	Koppelbus	St ELVZ	2100-24.1
21		8	Verz. schroef	A2	M6x16 DIN965
22	70519920	8	Pedaal kap	Rubber	-
23	70210049	4	Zwenkwiel (set)	Kunststof	ø150
24		4	Verz. schroef BZK	A2	M8x12 DIN7991
25	70210050	1	Afdekkap (set)	ABS	-
26	70210006	1	Hoekhefboom	St ELVZ	2100-17.2
27	70210026	1	Afstandsbus	St ELVZ	2100-18.2
28		1	Verz. schroef BZK	A2	M10x80 DIN7991
29		2	Asborgring	A2	12 DIN6799
30	70210034	1	Duw-as	RVS 304	2100-78
31		2	Glijlager met kraag	PA	16x20x22
32		2	Glijlager met kraag	PA	16x20x17
33	70210028	1	Scharnierbus	RVS 304	2100-79.1
34		1	Zeskantbout	A2	M12x70 DIN933
35		2	Borgmoer	A2	M12 DIN985
36	70210017	1	Trekstang	St ELVZ	2100-26.2
37	70210046	1	Slangklem	St ELVZ	32-44mm
38	70210013	1	Drijfstang	St ELVZ	2100-23.3
39	70210010	1	Geleider	St ELVZ	2100-19.5
40		1	Zeskantbout	A2	M12x55 DIN933
41	70210027	1	Scharnierbus	RVS 304	2100-82
42	70210030	4	Geleiderol	POM	2100-20
43	70210029	4	Afstandsring	RVS 304	2100-21
44		4	Cil.kop schroef bzk	A2	M8x16 DIN912
45	70210015	1	Schaarbeen buiten	St gec.	2100-31.3

Getekend: PS	Datum: 24-10-2005
Revisie: 3 /PS	Datum: 16-12-2008
Revisie: 2 /PS	Datum: 31-10-2006

Auteursrecht volgens
de wet voorbehouden

Maateenheid:
mm

Overzicht onderdelen

Lopital Nederland bv

Type nr: 61002100 -SL1

Mystral douchebrancard 61002100

Stuknr.	Art.nr.	Aantal	Naam	Materiaal	Opm./ Tek.nr.
46	70210016	1	Schaarbeen binnen	St gec.	2100-29.4
47	70210031	2	Schaar-rol	POM	2100-32.1
48	70210032	2	Bovenrol	POM	2100-42.2
49	70210035	2	Schaarblok	POM	2100-30
50	70210036	2	Midden as	St ELVZ	2100-34.3
51		4	Insteekdop	PE	ø22
52	70210053	2	Knop	Kunststof	10mm
53	70210020	1	Kantelhefboom rechts	St ELVZ	2100-40.2
54		4	Sluitring	PA	M10 DIN125
55	70210051	1	Pakking ring	Fiber	30x18x1,5
56	70210021	1	Kantelhefboom links	St ELVZ	2100-41.1
57		2	Omsteekdop	PVC zwart	17x45
58	70210040	1	Gasveer	St / RVS	150mm 200N
59		2	Cil.kop schroef bzk	A2	M5x25 DIN912
60		1	Glijbus	PA	05x08x07
61		4	Borgmoer	A2	M5 DIN985
62	70210018	1	Bovenframe	St gecoat	2100-43.1
63	70210019	1	Slanghouder	RVS 304	2100-44.3
64		2	Laagbolkopschroef BZK	A2	M5x10 ISO7380
65	70210056	1	Klemring	POM	2100-66
66	70210043	1	Klemschijf	Vikupor (wit)	2100-68
67	70210055	1	Uitloop	PP	2100-67
68		1	Pakking ring	Rubber	1 1/2"
69	70210054	1	Slang (compleet)	PVC	L=175cm
70	70210044	1	Bovenplaat	PC kleurloos	2100-47.6
71		8	Verz. schroef BZK	A2	M8x20 DIN7991
72		8	Borgmoer	A2	M8 DIN985
73		2	Verz. schroef	A2	M6x25 DIN965
74		2	Kraalring	Kunststof	6,4x22x4,5
75	70210023	2	Matrashaak	RVS	2400-14
76	70210022	1	Duwbeugel	RVS 304 gec.	2100-55.0
77	70210024	2	Zijhek	RVS gec.	2100-50
78	70210025	4	Klemplaat buiten	RVS gecoat	2100-49
79	70210052	4	Stootrubber	Rubber	ø15x13 M4
80	70210038	2	Klemplaat binnen (set)	RVS gecoat	2100-48.5
81	70210039	2	Borgpal	RVS 304	2100-58.2
82	70210041	2	Bladveer	RVS 301	2100-59.3
83		2	Dompeldop	PVC zwart	8mm
84		28	Laagbolkopschroef BZK	A2	M5x8 ISO7380
85		4	Bolverzonken schroef	A2	M4x8 DIN966
86	70210047	1	Matras	PVC	2100-61
87	70210048	1	Hoofdkussen	PVC	2100-62

Getekend: PS	Datum: 24-10-2005
Revisie: 3 /PS	Datum: 16-12-2008
Revisie: 2 /PS	Datum: 31-10-2006

Auteursrecht volgens
de wet voorbehouden

Maateenheid:
mm

Overzicht onderdelen

Lopital Nederland bv

Type nr: 61002100 -SL2